



**ESSAYEZ
GRATUITEMENT
NOS PRODUITS**


Contact au dos

CATALOGUE 2019/2020

TESTS DE DIAGNOSTIC RAPIDE



DROGUES ET ALCOOL

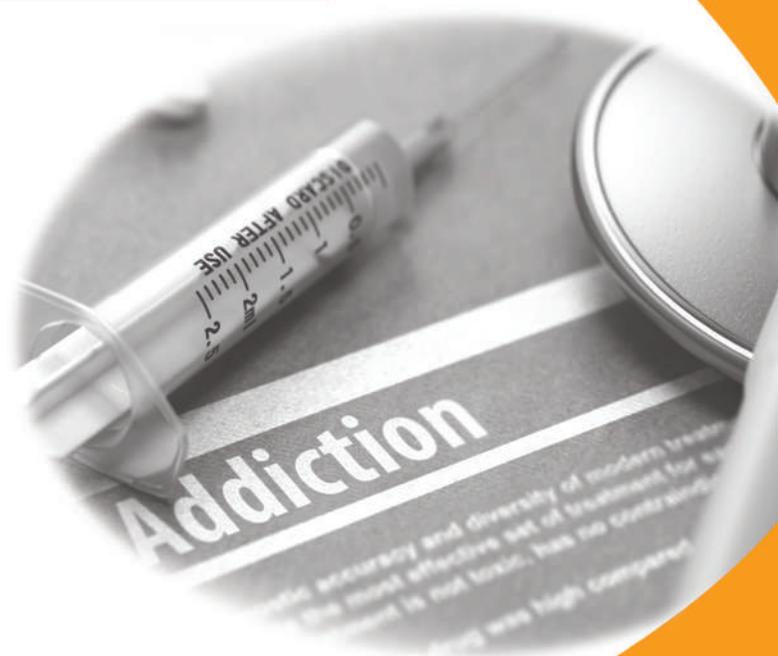

TODA PHARMA
2, rue du Rhin Napoléon
67000 STRASBOURG France

info@todapharma.com
www.todapharma.com
Tel: +33 (0)3 88 24 28 99



TODA PHARMA

Votre partenaire-prévention pour le dépistage des drogues !

EN BREF

Toda Pharma, fabricant de tests de diagnostic rapide et spécialiste des tests de dépistage des drogues, œuvre au quotidien dans le but de fournir aux professionnels de santé des outils de diagnostic rapide toujours plus fiables et pratiques. Notre équipe est à votre écoute pour toute question ou suggestion.



SOMMAIRE

1. GAMME DRUGDIAG URINAIRE - Dépistage de drogues

Présentation et explications des tests urinaires de dépistage des drogues	p.3
Tests urinaires de dépistage des drogues format cassette TODA DRUGDIAG CASSETTE ®	p.4
Tests urinaires de dépistage des drogues format CUP TODA DRUGDIAG CUP 2[®]	p.5
Tests urinaires de dépistage du cannabis format cassette THC triple seuils TODA DRUGDIAG 3 THC ®	p.6
Tests urinaires de dépistage des drogues à tremper TODA DRUGDIAG STRIPS ®	p.7

2. GAMME DRUGDIAG SALIVAIRE - Dépistage de drogues

Présentation et explications des tests salivaires de dépistage des drogues	p.8
Tests salivaires de dépistage des drogues TODA DRUGDIAG SALIVA ®	p.9

3. NOS AUTRES TESTS DE LA GAMME

Ethylotests chimiques et électroniques	p.10
Bandelettes urinaires TODA MULTIDIAG ®	p.11
Tests urinaires de dépistage rapide de la Cotinine-Nicotine TODA COTININEDIAG ®	p.11
Autres tests drogues disponibles sur demande	p.12

TODA DRUGDIAG URINAIRES

Test drogues urinaires

Notre gamme de tests urinaires innovants cible les molécules des différents toxiques que l'on retrouve dans l'urine. Nos tests ont la particularité d'être à la fois fiables, rapides et simples d'utilisation pour les personnes manipulant le test et non invasif pour les individus testés. Avec une lecture claire et précise des résultats, la gamme TODA DRUGDIAG urinaire représente une véritable innovation en matière de dépistage des drogues.

DROGUES DÉTECTÉES

ABREV.	DROGUES DETECTEES
THC	CANNABIS / HASCHICH / MARIJUANA
COC	COCAÏNE
OPI	HÉROÏNE / OPIUM / MORPHINE
AMP	AMPHETAMINES
MET/MDMA	METHAMPHETAMINE / ECSTASY
BZO	BENZODIAZEPINES
MTD	METHADONE
BAR	BARBITURIQUES
BUP	BUPRÉNORPHINE
TCA	ANTIDÉPRESSEURS TRICYCLIQUES

Données techniques :

Seuils de détection : Chaque substance est dépistée à un seuil de détection spécifique.

Si l'échantillon d'urine analysé contient un niveau de drogue supérieur au seuil indiqué, le test sera positif pour cette drogue, sinon, il sera négatif.

Durée de détection:

Temps de détection du cannabis :

THC dans l'urine : quel que soit le test utilisé, le THC (Cannabis/Haschich/Marijuana) ne peut en aucun cas être détecté plus de 3 à 5 jours dans l'urine après consommation occasionnelle et de 30 à 70 jours pour un usage régulier.

Temps de détection des autres drogues :

La cocaïne, l'héroïne, les amphétamines et l'ecstasy pourront être dépistées grâce à ce test sur une période de 2 à 4 jours après la dernière prise dans le cadre d'une consommation occasionnelle ou modérée. Ce temps peut varier en fonction du métabolisme propre à chacun, ainsi que de la quantité et de la qualité de la drogue qui a été consommée.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- (1) Dico des drogues. In Drogue info service. *Drogue Info Service* 2015-2018. Disponible en ligne sur la page Internet : : <http://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Le-dico-des-drogues> (2) Widmer N., Buclin T. & Augsburger M. (2008) Dépistage des substances d'abus. *Pharma-Flash* 2008; 35: 2, 3.

FORMATS DE NOS TESTS URINAIRES

Nos tests de dépistage de drogues urinaires se déclinent en 3 formats différents pour s'adapter à chacune de vos situations :

- Format Cassette



- Format Cup



- Format Test à tremper



TODA DRUGDIAG CASSETTE®

Tests drogues urinaires format cassette avec pipette

Test urinaire rapide sur cassette pour la détection qualitative et simultanée d'une ou plusieurs drogues et de leurs principaux métabolites dans l'urine.



8 tests - 8 pipettes
2-30°C

Avantages du test :

- Réalisation en moins d'une minute.
- Résultat en 5 minutes.
- Conservation à température ambiante.



UTILISATION



ABREV.	DROGUES DETECTEES	SEUIL (ng/ml)	Toda Drugdiag unitaire Coffret 25 tests Réf :	Toda Drugdiag 6 drogues Coffret 8 tests Réf. : 1046	Toda Drugdiag 8 drogues Coffret 8 tests Réf. : 1048	Toda Drugdiag 11 drogues Coffret 8 tests Réf. : 10411
THC	CANNABIS	50	1041-THC	✓	✓	✓
THC150	CANNABIS	150	1041-THC150			
AMP	AMPHETAMINES	300	1041-AMP	✓	✓ 1000 ng/ml	✓
BAR	BARBITURIQUES	300	1041-BAR			✓
BZO	BENZODIAZEPINES	300	1041-BZO		✓	✓
BUP	BUPRENORPHINE	10	1041-BUP	✓	✓	✓
COC	COCAÏNE	300	1041-COC	✓	✓	✓
MDMA	METHYLENEDIOXY-METHAMPHETAMINE	500	1041-MDMA			✓
MET	METHAMPHETAMINE	300	1041-MET	✓	✓	✓
MTD	METHADONE	300	1041-MTD		✓	✓
MOP	MORPHINE	300	1041-MOP	✓	✓	✓
TCA	ANTIDEPRESSEURS TRICYCLIQUES	1000	1041-TCA			✓

Autres combinaisons disponibles sur demande

TODA DRUGDIAG CUP 2^S®

Tests drogues urinaires format CUP

Test urinaire intégré au flacon de prélèvement en deux étapes pour la détection qualitative et simultanée de plusieurs drogues et de leurs principaux métabolites dans l'urine.



4 tests
2-30°C

Avantages du test :

- Résultat en 5 minutes.
- Test infalsifiable grâce à son dispositif de contrôle de la température d'urine et à son couvercle avec scellé qui assure que le test n'a pas été ouvert entre le prélèvement et le déclenchement du test.
- Test étanche grâce à son joint en caoutchouc présent dans le bouchon.
- Confidentialité des résultats grâce à une languette détachable présente sur la fenêtre de lecture.

EGALEMENT
DISPONIBLE

Toda drugdiag
Cup®

Détection immédiate
des drogues urinaires




UTILISATION

1

Collecter l'urine
du patient et refermer le
test avec le couvercle




Prélèvement
Urine

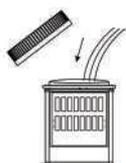

2


(1) Retirer le déclencheur du capuchon
(2) L'insérer au niveau de l'ouverture
(3) L'enfoncer pour enclencher le test

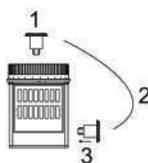

Attendre
5 minutes



Enlever la languette de
confidentialité et lire
les résultats

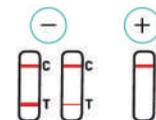

ABREV.

DROGUES
DETECTEES

Toda Drugdiag
6 Cup 2^S®

Coffret de 4 tests
Réf. : 1046-CUP2S
Seuil (ng/mL)

Toda Drugdiag
6+ Cup 2^S®

Coffret de 4 tests
Réf. : 1046-CUP2S+
Seuil (ng/mL)

Toda Drugdiag
11 Cup 2^S®

Coffret de 4 tests
Réf. : 10411-CUP2S
Seuil (ng/mL)

THC	CANNABIS	✓	50	✓	50	✓	50
AMP	AMPHETAMINES	✓	300	✓	1000	✓	300
BAR	BARBITURIQUES					✓	300
BZO	BENZODIAZEPINES					✓	300
BUP	BUPRENORPHINE	✓	10			✓	10
COC	COCAÏNE	✓	300	✓	300	✓	300
MDMA	METHYLENEDIOXY- METHAMPHETAMINE			✓	1000	✓	500
MET	METHAMPHETAMINE	✓	300	✓	1000	✓	300
MTD	METHADONE					✓	300
MOP	MORPHINE	✓	300	✓	300	✓	300
TCA	ANTIDEPRESSEURS TRICYCLIQUES					✓	1000


Autres combinaisons disponibles sur demande (de 2 à 15 drogues)

TODA DRUGDIAG 3 THC®

Tests cannabis urinaires - THC multi seuils à tremper

Test urinaire rapide à tremper permettant de détecter un palier de concentration faible, moyen ou fort dans l'urine. Il permet également le suivi des patients en cours de sevrage.

NOUVEAUTÉ
3 seuils sur la même cassette

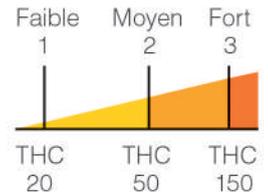

8 tests
2 - 30° C

Avantages du test :

- Test rapide semi-quantitatif THC.
- Utilisation sans pipette.
- Réalisation en moins d'une minute.
- Résultat en 5 minutes.
- Conservation à température ambiante.

Toda drugdiag 3 THC®

Coffret de 8 tests
Réf. : 1041-3THC

Temps	5 min
Seuil	20, 50 et 150 ng/ml


UTILISATION



1 Recueillir l'urine



2 Immerger le test dans l'urine

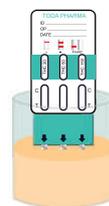

Attendre 5 minutes



3 Lire le résultat après 5 min dans le tableau ci-dessous


Toxiques	Calibrateurs	Seuil (ng/ml)
Cannabis (THC)	$\Delta 9$ -THC	20
Cannabis (THC)	$\Delta 9$ -THC	50
Cannabis (THC)	$\Delta 9$ -THC	150

Une urine positive à un seuil de THC donné entrainera l'apparition d'une bande colorée au niveau de la zone de contrôle (C) uniquement.


A. Positif au 1 : Faible concentration de THC (entre 20 et 49ng/ml). Consommation occasionnelle ou ancienne.

B. Positif au 1 et 2 : Présence significative de THC (entre 50 et 149 ng/ml). Consommation modérée ou récente.


C. Positif au 1, 2 et 3 : Très forte concentration de THC (supérieure à 150ng/ml). Consommation de doses importantes de façon récente ou chronique.

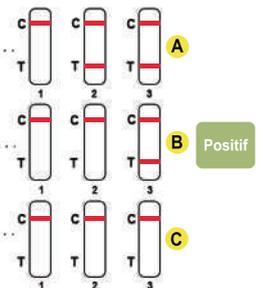

Une urine négative au THC entrainera l'apparition de deux bandes colorées (en 1, 2 et 3), l'une dans la zone de test (T) et l'autre dans la zone de contrôle (C).

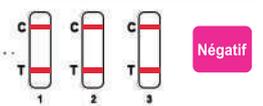

Si absence de bande de couleur dans la zone de contrôle (C). Il faut relire la procédure et recommencer le test.

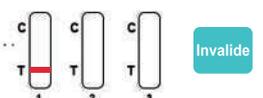

TODA DRUGDIAG STRIPS®

Tests drogues urinaires à tremper

Test rapide à tremper pour la détection qualitative et simultanée d'une ou plusieurs drogues et de leurs principaux métabolites dans l'urine.




25 tests
2 - 30° C

Avantages du test :

- Utilisation sans pipette.
- Réalisation en moins d'une minute.
- Résultat en 5 minutes.
- Conservation à température ambiante.



UTILISATION

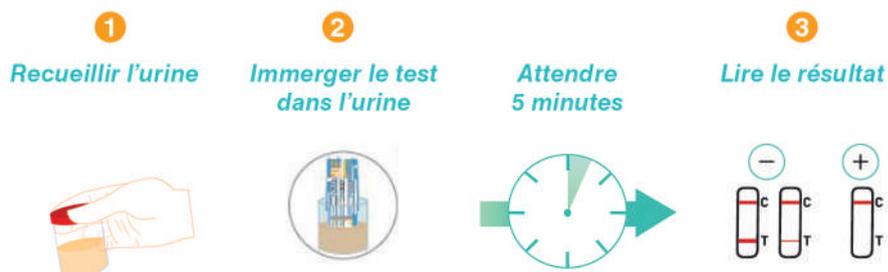

ABREV.	DROGUES DETECTEES	Toda Drugdiag 2T®		Toda Drugdiag 5T®		Toda Drugdiag 6T®		Toda Drugdiag 6TS®		Toda Drugdiag 6T+®		Toda Drugdiag 10T®	
		Coffret de 25 tests Réf. : 1042T-A Seuil (ng/ml)		Coffret de 25 tests Réf. : 1045T-B Seuil (ng/ml)		Coffret de 25 tests Réf. : 1046T-A Seuil (ng/ml)		Coffret de 25 tests Réf. : 1046T-B Seuil (ng/ml)		Coffret de 25 tests Réf. : 1046T-C Seuil (ng/ml)		Coffret de 25 tests Réf. : 1041T-A Seuil (ng/ml)	
THC	CANNABIS	✓	50			✓	50	✓	50	✓	50	✓	50
AMP	AMPHETAMINES			✓	300					✓	1000	✓	300
BAR	BARBITURIQUES											✓	300
BZO	BENZODIAZEPINES			✓	300	✓	300	✓	300			✓	300
BUP	BUPRENORPHINE					✓	10	✓	10			✓	10
COC	COCAÏNE	✓	300	✓	300	✓	300	✓	300	✓	300	✓	300
MDMA	METHYLENEDIOXY-METHAMPHETAMINE									✓	1000	✓	500
EDDP	METABOLITE DE LA METHADONE							✓	100			✓	100
MOP	MORPHINE			✓	300	✓	300	✓	300	✓	300	✓	300
TCA	ANTIDEPRESSEURS TRICYCLIQUES											✓	1000
MET	METHAMPHETAMINE			✓	300					✓	1000		
MTD	METHADONE					✓	300						

Autres combinaisons disponibles sur demande

TODA DRUGDIAG SALIVA[®]

Tests drogues salivaires

Notre gamme de tests salivaires innovants cible les molécules des différents toxiques que l'on retrouve dans la salive. Ces tests détectent les mêmes traces de toxiques que celles recherchées lors des dépistages pratiqués au bord de la route par la Police et la Gendarmerie. Très facile d'utilisation avec une lecture simplifiée, la Gamme TODA DRUGDIAG SALIVA représente une véritable innovation en matière de dépistage des drogues salivaires.

DROGUES DÉTECTÉES

ABREV.	DROGUES DETECTEES
THC	CANNABIS / HASCHICH / MARIJUANA
COC	COCAÏNE
OPI	HÉROÏNE / OPIUM / MORPHINE
AMP	AMPHÉTAMINES
MET/MDMA	METHAMPHETAMINE / ECSTASY
BZO	BENZODIAZEPINES
MTD	METHADONE

Données techniques :

Seuils de détection : Chaque substance est dépistée à un seuil de détection spécifique.

Si l'échantillon de salive analysé contient un niveau de drogue supérieur au seuil indiqué, le test sera positif pour cette drogue, sinon, il sera négatif.

Durée de détection:

Temps de détection du cannabis :

THC dans la salive : quel que soit le test utilisé, le THC (Cannabis/Haschich/Marijuana) ne peut en aucun cas être détecté plus de 4 à 6 heures dans la salive après consommation. Le temps de détection de notre test sera donc de 4 à 6 heures après le dernier joint fumé, quelque soit le niveau de consommation.

Temps de détection des autres drogues :

La cocaïne, l'héroïne, les amphétamines et l'ecstasy pourront être dépistés grâce à ce test sur une période de 24 à 48 heures après la dernière prise. Ce temps peut varier en fonction du métabolisme propre à chacun, ainsi que de la quantité et de la qualité de la drogue qui a été consommée.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

(1) Richard D, Senon JL. Le cannabis. Paris : Presses Universitaires de France : 1996 (2) Johansson E, Noren K, Sjovall J, hallidin MM. Determination of delta-1 tetrahydrocannabinol in human fat biopsies from marijuana users by gas chromatography- mass spectrometry. Biomed Chromatogr 1989 ; 3 : 35-38 (3) Baselt RC, Cravey RH. Disposition of toxic drugs and chemicals in man. Foster City : Chemical Toxicology Institute, (1995) (4) Kintz P, Machart D, Jamey C, Mangin P. Comparison between GC-MS and the EMIT II, Abbott ADx, and Roche Online immunoassays for the determination of THC-COOH. J Anal Toxicol 1995 ; 19 : 304-306

SOLUTIONS DE CONTRE-EXPERTISE

ÉGALEMENT DISPONIBLE : Solutions de contre-expertise pour le transport et l'analyse de la salive en laboratoire.

Nos solutions de contre-expertise sont des dispositifs fiables, simples et rapides pour obtenir une confirmation de vos résultats.



GAMME TODA DRUGDIAG^{SALIVA}®

Tests drogues salivaires

La gamme TODA DRUGDIAG SALIVA® regroupe plusieurs tests immunochromatographiques pour la détection qualitative de toxiques et de leurs principaux métabolites dans la salive.



5 tests
2 - 30° C

Avantages du test :

- Test facile à utiliser.
- Appartition des résultats à partir de 3 minutes.
- Interprétation rapide et simplifiée.
- Impossibilité pour les personnes testées de falsifier le test.
- Confidentialité des résultats grâce à une languette détachable présente sur la fenêtre de lecture.



UTILISATION SIMPLE EN 3 ÉTAPES



1
Retirer le bouchon




2
Attendre que les deux lignes de contrôle



Attendre 3 à 10 minutes



3
Interpréter

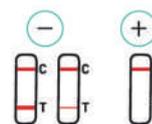

ABREV.	DROGUES DETECTÉES	Toda Drugdiag saliva THC® Coffret de 5/25 tests Réf. : 1041-SAL-THC-5/-25 Seuil (ng/ml)	Toda Drugdiag saliva 5+® Coffret de 5/25 tests Réf. : 1045-SAL-5/-25 Seuil (ng/ml)	Toda Drugdiag saliva 6+® Coffret de 5 tests Réf. : 1046-SAL Seuil (ng/ml)	Toda Drugdiag saliva 6+® Coffret de 5 tests Réf. : 1046-SAL1 Seuil (ng/ml)
THC	CANNABIS / HASCHICH / MARIJUANA	✓ 15	✓ 15	✓ 15	✓ 15
AMP	AMPHETAMINES		✓ 50	✓ 50	✓ 50
OPI	HEROINE / OPIUM / MORPHINE		✓ 10	✓ 40	✓ 40
BZO	BENZODIAZEPINES			✓ 30	
COC	COCAÏNE		✓ 10	✓ 20	✓ 20
MET/MDMA	METHYLENEDIOXY-METHAMPHETAMINE		✓ 50	✓ 50	✓ 50
MTD	METHADONE				✓ 30

Autres combinaisons disponibles sur demande

PROGRAMME DE SENSIBILISATION

Afin d'optimiser votre campagne de prévention des drogues, TODA PHARMA vous propose de créer des programmes personnalisés de communication.

Contactez-nous pour en savoir plus !

TESTS DE RECHERCHE ALCOOLIQUE

ETHYLOTEST ÉLECTRONIQUE TP090



L'éthylotest électronique TP090 est équipé d'un capteur de pression de souffle couplé à un capteur électrochimique, technologie utilisée pour les éthylotests des forces de l'ordre, ce qui garantit une grande fiabilité.

Facile d'utilisation, cet éthylotest vous permet d'obtenir des résultats en quelques secondes dans la plus grande simplicité ! Le préchauffage ne dure pas plus de 8 secondes et les résultats s'affichent en 3 chiffres sur l'écran LCD.

Les + produit : Il est fourni dans une malette de protection, dispose d'une batterie et peut également fonctionner avec un chargement sur secteur.

Composition de la malette :

- 1 Ethylotest électronique.
- 10 Embouts buccaux (usage unique) avec clapet anti-retour.
- 1 Pile 9V alcaline.
- 1 Prise allume-cigare DC 12V adaptateur Jack.
- 1 Pochette de rangement avec dragonne de transport.
- 1 Notice d'utilisation multilingue.

Certifié NF

Répond aux exigences de la norme NFX 20-704

RÉFÉRENCES

Malette complète éthylotest électronique : 0101OB-01
Boîte de 100 embouts : 0101OB-02

ETHYLOTEST CHIMIQUE À USAGE UNIQUE



Nos éthylotests chimiques à usage unique permettent une détection rapide et fiable du taux d'alcoolémie dans l'air expiré.

Facile à transporter et à stocker, ces éthylotests fournissent une interprétation claire des résultats tout en restant très simple d'utilisation.

Fabriqués en France, ils répondent à l'ensemble des normes et des exigences en vigueur sur les éthylotests chimiques et vous permet de pouvoir faire confiance aux résultats de vos dépistages d'alcoolémie.

- Certifié ISO 9001.
- Répond aux exigences du décret 2015-775 et à la réglementation REACH.
- 2 seuils de détection disponibles : 0,25mg/L d'air expiré soit 0,5g/L de sang ou 0,1mg/L d'air expiré soit 0,2g/L de sang.
- Ethylotests ballon sans chrome.

RÉFÉRENCES

Éthylotest ballon : Ref : 0101CO-01
Éthylotest sans ballon - écologique : Ref : 0101TU-01



TODA MULTIDIAG®

Bandelettes urinaires multi paramètres

Lecture visuelle en moins d'une minute.

Bandelettes réactives d'analyse d'urine permettant une détection immédiate de plusieurs paramètres dans l'urine pour l'examen et le suivi des pathologies courantes.



Prélèvement
Urine

10 PARAMÈTRES DISPONIBLES

LEU	LEUCOCYTES	BLO	SANG
NIT	NITRITES	SG	DENSITE SPECIFIQUE
URO	UROBILINOGENE	KET	CORPS CETONIQUES
PRO	PROTEINES	GLU	GLUCOSE
pH	pH	BIL	BILIRUBINE

PARAMÈTRES DES TESTS

Toda Multidiag 4®

Réf. : Boîte de 100 - 1004-100

Toda Multidiag 8®

Réf. : Boîte de 50 - 1008-50

Réf. : Boîte de 100 - 1008-100

Toda Multidiag 10®

Réf. : Boîte de 50 - 1010-50

Réf. : Boîte de 100 - 1010-100

	LEU	NIT	URO	PRO	pH	BLO	SG	KET	GLU	BIL
Toda Multidiag 4®				✓	✓	✓			✓	
Toda Multidiag 8®	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Toda Multidiag 10®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TODA COTININDIAG®

Tests urinaires de dépistage rapide de la nicotine dans l'urine format cassette



Prélèvement
Urine



25 tests
2 - 30° C

Test immunochromatographique rapide détectant la cotinine (principal métabolite de la nicotine) dans l'urine.

Temps	5 min
Seuil	100 ng/ml

REFERENCES
Kit de 25 tests : 1041-COT

AUTRES TESTS DISPONIBLES SUR DEMANDE

COMPOSITION AU CHOIX

Test de drogue à composer ? Vous pouvez nous soumettre la composition de votre choix et nous nous chargeons de vérifier sa faisabilité.

DROGUES DISPONIBLES

- | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Amphétamine | <input type="checkbox"/> Barbituriques | <input type="checkbox"/> Benzodiazépines | <input type="checkbox"/> Buprénorphine | <input type="checkbox"/> Méthamphé
tamine | <input type="checkbox"/> Méthaqualone |
| <input type="checkbox"/> Cotinine | <input type="checkbox"/> Créatinine | <input type="checkbox"/> Cannabinoïdes | <input type="checkbox"/> Cocaïne | <input type="checkbox"/> Paracétamol | |
| <input type="checkbox"/> Ecstasy | <input type="checkbox"/> MDA | <input type="checkbox"/> EDDP | <input type="checkbox"/> Ethylglucuronide | <input type="checkbox"/> Méthylphénidate | <input type="checkbox"/> Phencyclidine |
| <input type="checkbox"/> Morphine
/opiacés | <input type="checkbox"/> Antidépresseurs | <input type="checkbox"/> Fentanyl | <input type="checkbox"/> Kétamine | <input type="checkbox"/> Propoxyphène | <input type="checkbox"/> Tramadol |
| | <input type="checkbox"/> Spice/K2 | <input type="checkbox"/> Oxycodone | <input type="checkbox"/> Méthadone | <input type="checkbox"/> Zolpidem | |

D'autres combinaisons sont disponibles sur demande

FORMATS DISPONIBLES

- Urinaire cassette avec pipette
- Urinaire cassette à tremper
- Urinaire CUP
- Salivaire
- Sanguin
- Sur surface

TYPES DE RÉSULTATS

- Qualitatif
- Semi-quantitatif

Notre mission :

Fabricant de tests de diagnostic rapide, Toda Pharma œuvre au quotidien dans le but de fournir aux professionnels de santé des outils de diagnostic rapide toujours plus fiables et pratiques. Notre équipe est à votre écoute pour toute question ou suggestion.

NOS COORDONNEES

TODA PHARMA

France

Tél. : +33 (0)3 88 24 28 99

www.todapharma.fr
info@todapharma.com

TODA PHARMA

Belgique

Tél. : +32 (0)2 808 48 98

www.todapharma.be
contact@todapharma.com

TODA PHARMA

United Kingdom

Tél. : +44 (0)20 3129 9639

www.todapharma.co.uk
sales@todapharma.com

TODA PHARMA

Deutschland

Tél. : +49 (0)6421 968 94 520

www.todapharma.com
kontakt@todapharma.com